



Användarmanual

Petter® Skyddsvisir
med skum och resår



1 MET5659 (covid-19) 3
Plast Petter AB, ZSKYVIS0003

Skydd mot
droppsmitta inom
vård och omsorg



Art. nr:
ZSKYVIS0003

Petter® Skyddsvisir med skum och resår

Lättanvänt ansiktssvisir för flergångsbruk som skyddar mot droppsmitta och stänk av tex kroppsvätskor och andra lösningar. Glasklart visir bidrar till optimal sikt vid användning. Tillverkad i Sverige.

Användning:

Placera skumgummidelen mot pannan och trä det elastiska resårbandet över huvudet så att det är placerat i centrum av bakhuvudet. Justera så att visiret sitter rakt framför ansiktet och så att det känns bekvämt att bära.

Rengöring och desinfektion av visir:


1. Desinfektera händerna med handdesinfektionsmedel, tag på skyddshandskar.
2. Använd ytdesinfektionsmedel med mer

än 70% alkoholhalt (etanol eller isopropanol) med rengörande effekt (tensider).

3. Applicera medlet och bearbeta visirets plastdelar med rent torkpapper över alla ytor. Låt torka före återanvändning.

Efter användning: Produkten skall sorteras som plastavfall.

Märkning förklaring:

 = Identifiering av tillverkaren – Plast Petter AB.

1 = Optisk klass (1, 2 el. 3).

MET5659(covid-19) = Aktuell standard/metod.

3 = Användningsområde – skydd mot vätska och stänk.



Denna bruksanvisning ska göras tillgänglig för varje användare.

Skyddet har typprovats och uppfyller kraven enligt MET5659, utgåva 1.


EU-typkontrollen är genomförd av RISE Research Institutes of Sweden AB, Box 857, SE-50115 BORÅS, Anmält organ nr. 0402.

Produkten uppfyller kraven enligt PPER (EU) 2016/425.

EU-försäkran om överensstämmelse finns att ladda ner på www.skyddsvisir.se.

Förväntad livslängd för produkten i obruten förpackning är mer än 10 år.



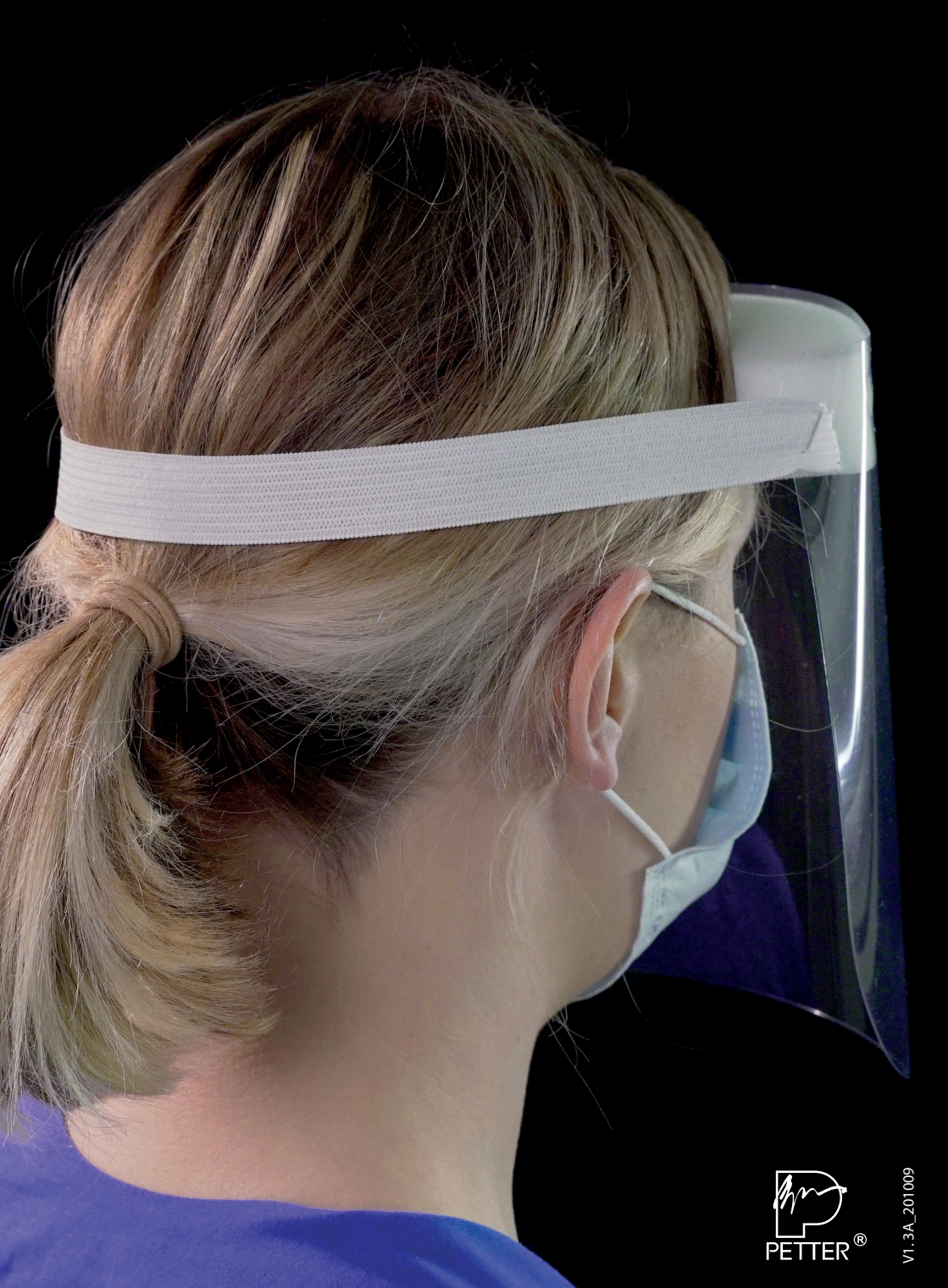

VI.3A_201009