



## Skydd mot droppsmitta inom vård och omsorg

Art. nr:  
**ZSKYVIS0003**

### Petter® Skyddsvisir med skum och resår

Petter® skyddsvisir med skum och resår för flergångsbruk har utvecklats för att användas som skydd mot droppsmitta inom vård och omsorg. Skyddet består av ett elastiskt resårband, ett mjukt skumgummi som vilar mot pannan samt en glasklar visirdel.

Skyddet har utvecklats för att möta kraven i EN 166:2001 Ögonskydd. Produkten är CE-certifierad. Skyddet har typprovats enligt MET5659, av RISE Research Institutes of Sweden AB. Skyddet uppfyller kraven på samtliga punkter.

Levereras färdigmonterad om 100 st. per förpackning. Komplet pall innehåller 30 st. förpackningar (3000 st.). Vikt/st: 33g

Produktens ingående material uppfyller kraven enligt REACH direktivet 76/769/EEC, Annex XVII.

#### Rengöring och desinfektion av visir:

1. Desinfektera händerna med handdesinfektionsmedel.
2. Tag på skyddshandskar.
3. Rengör och desinfektera visirets plastdelar med rikligt med alkoholbaserat ytdesinfektionsmedel med rengörande effekt. Bearbeta mekaniskt med torkpapper över hela ytan.

#### Specifikation Skumgummi

Material: Polyeter H25  
Mått: B 280mm x H 30mm x D 35mm

#### Specifikation Visir

Material: Glasklar PET  
Tjocklek: 0,25mm  
Mått: B 332mm x H 222mm

